

m·able

介助用グローブ
マーブルグローブ(ディスポタイプ)

ベッド上でのスムーズで快適な移動や、
 リラックスできるケアをサポートします。

- ✓ **使い捨てタイプで安心安全**
- ✓ **感染症対策にも最適**
- ✓ **抜けにくさに配慮した独自形状**



着用イメージ



心地よい介助を!

よく滑る素材で作られているため、
 療養者とマットレスの間に楽に手を滑り込ませることができ
 療養者の身体を守りながら介助することができます。

型番	MGD-1	サイズ (cm)	幅 21× 長さ 50
材質	ポリエチレン		


●商品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。

使用例

姿勢の整え



体重がかかりやすい腰部から頭側に、背中を伸ばし胸を開くように体重を分散させていきます。

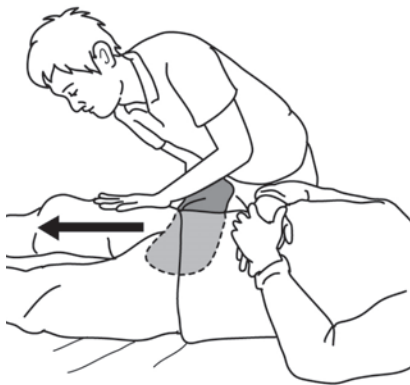

体重がかかりやすい腰部から足先に、足を伸ばすように体重を分散させていきます。

背上げ後のケア



ベッドを背上げします。足側にずれないように膝を抑えて、臀部の圧を抜きます。




上半身は腰部から頭側に、背中を伸ばし胸を開くように圧を抜いていきます。

横への移動



頭部と胸部に手を差し込み腕全体で体を支え、手前に引きます。

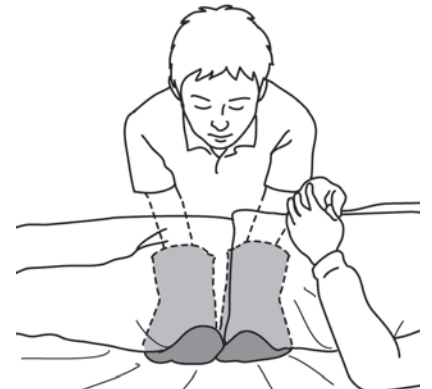

臀部に手を差し込み、仙骨を擦らないように両腕を揃えて手前に引きます。踵を擦らないように足を移動させ、最後に姿勢を整えます。

使用上の注意

- ・滑りやすい素材のため、床の上やベッドの上に放置しないでください。転倒・転落の原因となります。
- ・体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合がございます。異常を感じたらご使用を中止してください。
- ・血液や排泄物等で汚染された場合は速やかに廃棄してください。
- ・火気、高温のものに近づけないでください。
- ・無理な力を加えたり鋭利なもので傷つけないでください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。