

m·able

ポジショニングクッション

実用新案登録済(実願2020-000114)

マーブルクッション

マーブルクッションは、こんな方におすすめです！

- ✓ 寝返りが困難な方
- ✓ 関節拘縮がある方
- ✓ 円背がある方
- ✓ 床ずれがある方(できそうな方)
- ✓ リラックスしておやすみしたい方



中材は、特殊なビーズとパイプの2つの素材をミックス。

中材が動かせるので、細かい調整が可能で体にしっかりフィットします。

また、体に合わせて変形した状態を保持するため、最適な状態をキープします。

もっちりとした心地いい感触で、耐久性やメンテナンス性にも優れています。



カタチいろいろ。使い方もいろいろ。

詳しくは裏面をチェック！



関節拘縮や円背など、身体の変形があると特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。

そういった状態は床ずれになるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因にもなります。

マブルクッションを使えば、体圧分散性を高め良い姿勢作りが可能です。

特殊なビーズとパイプの組み合わせにより、身体へのフィット性とポジショニングした後の保持能力に優れています。

豊富なバリエーションとともに、あらゆる体格・部位・変形に対応します。


体位変換・床ずれ予防・関節拘縮対策にオススメです。

使用例




D タイプの場合

頭部から胸部までをカバーできるタイプ。円背の方の上半身を支えるのに適しています。

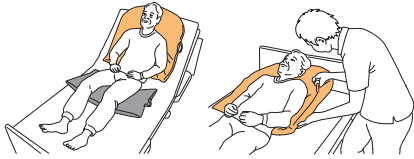


I タイプの場合

身体をくると囲うことができる細長いタイプ。仰臥位の頭部、肩、腕を同時に、また、側臥位の頭部、肩、腕、背中、臀部、足までを同時に支えることができます。

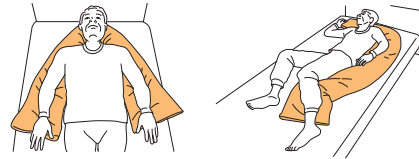


J タイプの場合

先がカギ状に曲がったタイプ。大きなサイズなので側臥位の背中と臀部、また、腹臥位の腹部と大腿部を同時に支えることができます。

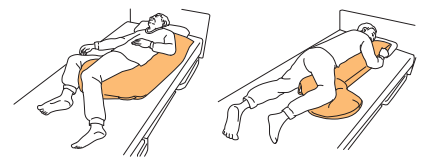


W タイプの場合

2本の溝がある四角いタイプ。仰臥位の脚部を溝に沿わせることで体圧分散ができます。

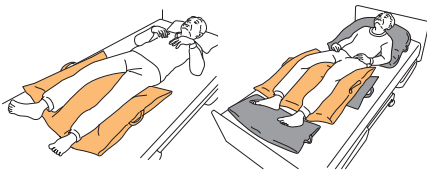


S1 タイプの場合

長方形の大きめのタイプ。側臥位の背中や、仰臥位の大腿部の下など、使用場面の多い使いやすいクッションです。

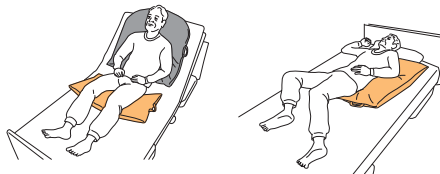


S2 タイプの場合

長方形の中くらいの大きさのタイプ。仰臥位の腕や、ふくらはぎを支えるのに適しています。

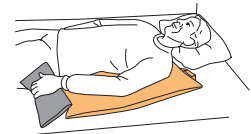

S3 タイプの場合

長方形の小さめのタイプ。仰臥位の腕を支えたり、脚部や腰部を安定させるのに適しています。

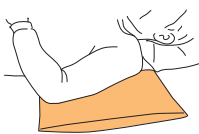


S4 タイプの場合

長方形の小さなタイプ。大きなクッションの下に差し込んで、高さや角度を調整するのに適しています。



M2 タイプの場合

車いす上で、大腿部の上に置いて使います。前方に支持面ができ、クッションに腕を乗せることで前傾姿勢を促し、骨盤を立たせ、姿勢が崩れるのを防ぎます。円背の方、体幹が不安定な方、骨盤の後傾によって前ズレ姿勢になりやすい方におすすめです。

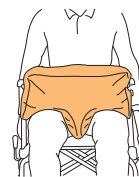

C1 タイプの場合

背中から肩、腕を支えることにより、座位姿勢の崩れを防ぎます。



| 種類 | D | I | J | W | S1 | S2 | S3 | S4 (内カバーなし) ※2個入り | M2 | C1 |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| サイズ (cm) | 80×80 | 33×230 | 120×40 (60) | 70×85 | 40×80 | 25×60 | 25×40 | 15×30 | 22×40 | 37×100 |
| 質量 (kg) | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 1.0 |
| TAISコード 上段・清拭タイプ 下段・洗浄タイプ | 01908-000001 01908-000002 | 01908-000003 01908-000004 | 01908-000005 01908-000006 | 01908-000007 01908-000008 | 01908-000009 01908-000010 | 01908-000011 01908-000012 | 01908-000013 01908-000014 | (清拭タイプなし) 01908-000015 | 01908-000027 01908-000028 | 01908-000018 01908-000019 |
| 材質 | 中材：ポリプロピレン、ポリエチレン (M2はポリエチレンのみ) 清拭タイプ内カバー：ナイロン、ポリウレタンフィルム / 洗浄タイプ内カバー：ポリエステル / 外カバー：ポリエステル、綿 | | | | | | | | | |

●商品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。

取扱店