


m·able

介助用グローブ  
マーブルグローブ

ベッド上でのスムーズで快適な移動や、  
リラックスできるケアをサポートします。

✓ 抜けにくさに配慮した独自形状

✓ 抜群の滑りやすさ

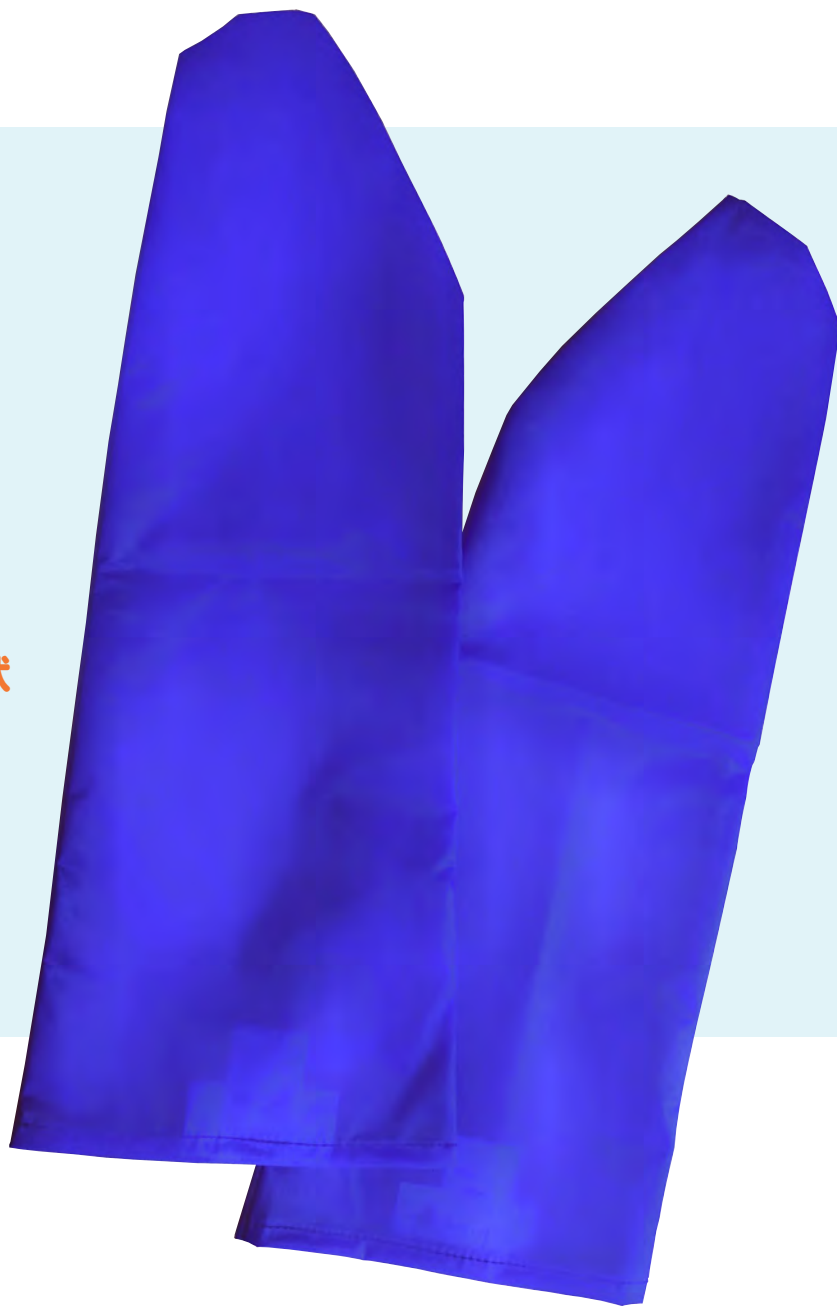

## 心地よい介助を！


よく滑る素材で作られているため、療養者とマットレスの間に楽に手を滑り込ませることができ療養者の身体を守りながら介助することができます。

型番	MG-1	サイズ (cm)	幅 18× 長さ 50
材質	ナイロン 100%		


●商品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。

## 使用例

### 姿勢の整え

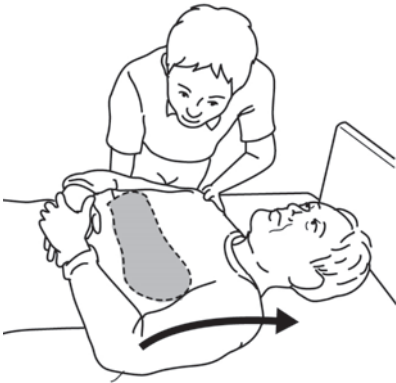

体重がかかりやすい腰部から頭側に、背中を伸ばし胸を開くように体重を分散させていきます。

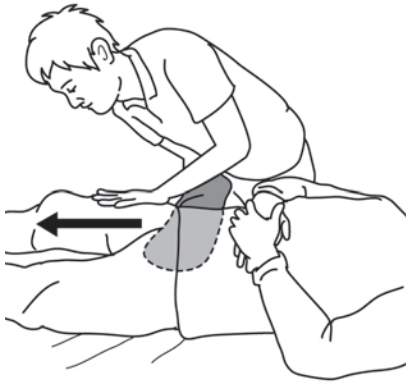

体重がかかりやすい腰部から足先に、足を伸ばすように体重を分散させていきます。

### 背上げ後のケア



ベッドを背上げします。足側にずれないように膝を抑えて、臀部の圧を抜きます。




上半身は腰部から頭側に、背中を伸ばし胸を開くように圧を抜いていきます。

### 横への移動



頭部と胸部に手を差し込み腕全体で体を支え、手前に引きます。

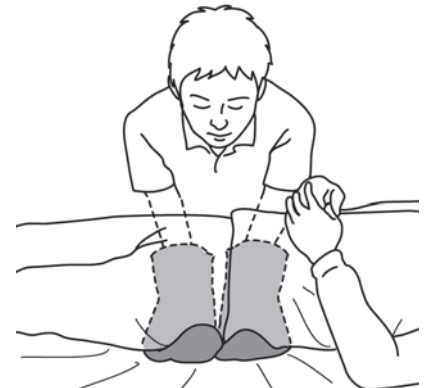

臀部に手を差し込み、仙骨を擦らないように両腕を揃えて手前に引きます。踵を擦らないように足を移動させ、最後に姿勢を整えます。

## お手入れ方法

- ・30℃以下の液温で洗濯してください。
- ・中性洗剤を使用してください。



## 使用上の注意

- ・滑りやすい素材のため、床の上やベッドの上に放置しないでください。転倒・転落の原因となります。
- ・体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合がございます。異常を感じたらご使用を中止してください。
- ・火気、高温のものに近づけないでください。
- ・無理な力を加えたり鋭利なもので傷つけないでください。
- ・薬品や溶剤によっては変質及び変形する場合がございますので、ご確認の上ご使用ください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。