

m·able

ハイブリッド型体圧分散式マットレス

マール マットレス ^{アイオ} AiO

エアとウレタンのハーモニーで「愛を」伝えるマットレス
安心の体圧分散と、安定の寝心地と動きやすさをお届けします



- ✓ **オールインワン** ※ All in One = AiO (アイオ)

 - 床ずれリスク軽度～中等度まで、マットレスの交換なしで使える体圧分散式マットレス。
 - OHスケール1～7の方が対象。
- ✓ **エアとウレタンの良さを融合した真のハイブリッド構造 (ステイブル・ハイブリッド)**

 - 静止型に近い安定性と寝心地 (アップフォームの効果)。ポジショニングもしやすい。
 - 頭部・胸部の安定性 (ヘッドフォームの効果)。
- ✓ **ユーザー様に寄り添う安心感**

 - 耐荷重は180kgなので大柄な方でも安心 (体重を入力するので安心感があります)。
 - あえてアナログな調整を残し、ユーザー様の好みや介護者の判断で設定を調整できます。
- ✓ **簡単に使える (オートマッチングシステム)**

 - 電源を入れて体重を入力するだけで、自動的に適切な内圧設定になります。

型番	MM-AIO	TAIS コード	01908-000026
サイズ (cm)	幅 91 × 長さ 191 × 厚さ 17	重量 (kg)	10
材質	カバー：ポリエステル、ポリウレタン マットレス：ウレタンフォーム、TPU		


●商品の仕様、価格などは予告なく変更することがあります。

ステイブル・ハイブリッド構造

マットレス表面にはアップフォームを配置しています。マットレス表面がエアセルのマットレスに比べ、優れた安定性を発揮します。

さらに頭部は2層目にもヘッドフォームを配置。エアマットレス特有の船酔い状態になることを防ぎます。

ベッド上でのリハビリやポジショニングなど、ケアのしやすさもサポートします。

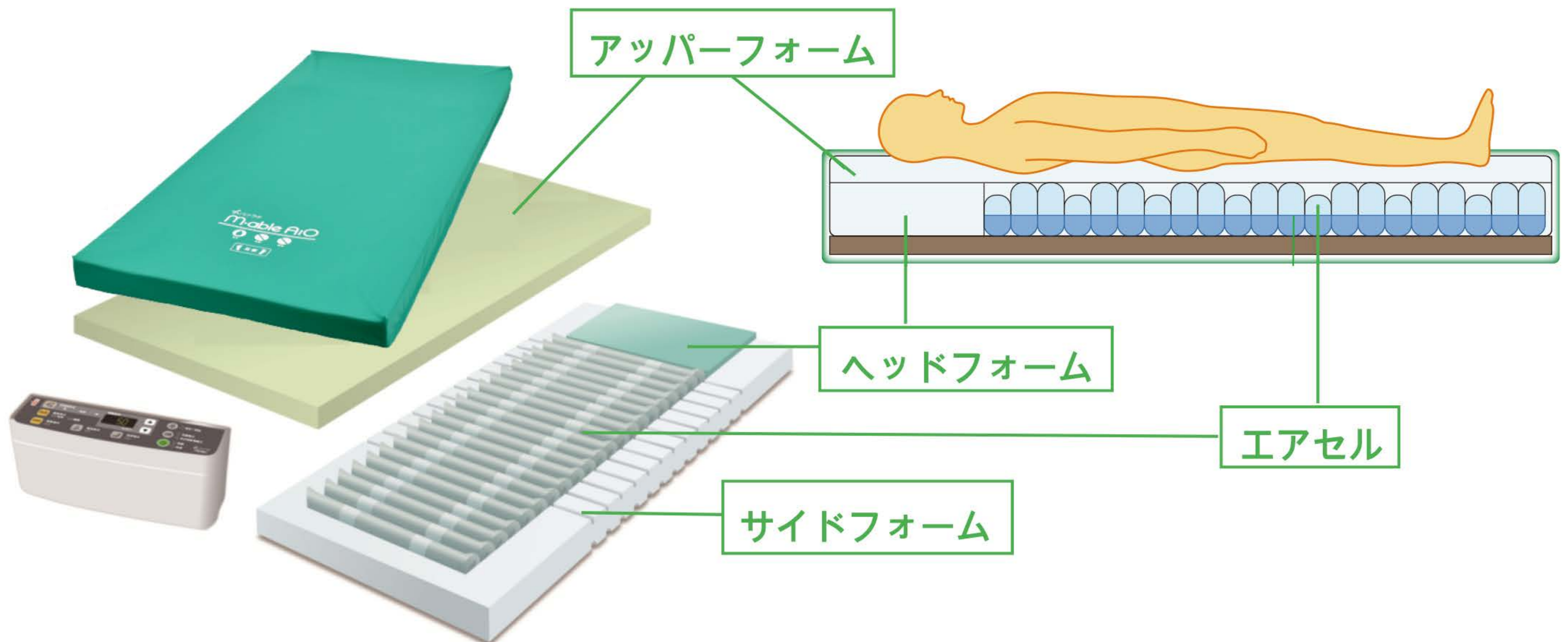

安全な環境を提供します



サイドフォームにより端座位も安定。
離床モードとの組み合わせでさらに安定し、
移乗も安全に行えます。

オート・マッチングシステム

体重を入力するだけで、最適な内圧に調整します。

お好みに合わせて硬さ調整や圧切り替え時間なども選択できます。

背上げや離床、リハビリ時に適したモードも備えています。



シンプルな操作パネルで操作も簡単です。ポンプの厚みはわずか8cmと薄く、重さはわずか1.5kgと軽量。コンパクト設計で場所もとりません。